

Veiledning til HÅRPRØVETAKING for DNA-basert avstammingskontroll privatoppdrag NPA

 <p>1. Finn frem til øvre ende på halen, splitt hårene</p>	 <p>2. Ta en tjafs med ca 30 hårstrå rundt 5 cm fra enden på halen</p>	 <p>3. Snurr hårtjafsens godt rundt pekefingeren og napp oppover</p>
	<p>4. Dra slik at tjafsens løsner fra halen, napp raskt og bestemt</p> 	
	<p>5. Slik bør den se ut, med hårrøtter i enden </p> <p>6. Hårrøttene må være med, ellers må prøven tas på nytt</p> <p>7. Hårrøtprøven bntes gjerne med en vanlig maskerings-tape ca 1-2 cm fra enden av hårrøten. Merk tape med NPA/id nr. Den lange enden uten hårrøtter kan klippes og kastes.</p>	
	<p>8. NB! Legg hårprøvene i en papirkonvolutt og merk med navn og NPA/id nr.</p>	<p>9. Hårprøven sendes til stambokfører sammen med utfylt springseddel (se baksiden av springseddel).</p>